

پانسمان آلژی پد (AlgiPad® Dressing)

پانسمان آلژی پد، در حوزه مراقبت، مدیریت و درمان زخم بیماری‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و منازل دارای زخم در فازهای مختلف درمان هستند، به عنوان پانسمان اولیه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های پانسمان آلژی پد:

پانسمان آلژی پد با تکنولوژی بالا و منحصر به فرد، حاصل سال‌ها تحقیق، پژوهش، تلاش و کسب تجربه محققان و دریافت نظرات تخصصی از پیشگامان درمان زخم، طراحی و ساخته شده و در حوزه مدیریت و درمان زخم جزء پانسمان‌های فوق تخصصی جهت درمان انواع زخم حاد و مزمن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پانسمان آلژی پد به نام شرکت رسا سلامت آروند، ثبت اختراع گردیده است.

- پانسمانی با قابلیت جذب ترشحات
- کاهش ریسک خیس خوردگی در تعویض‌های طولانی مدت پانسمان
- سهولت استفاده از پانسمان آلژی پد
- انعطاف نسبی جهت تطبیق به بستر زخم
- پانسمان آلژی پد در زخم‌های فاز التهابی، گرانوله و اپیتلیزه، قابل استفاده است.
- کاهش زمان بهبودی و تسریع در درمان زخم‌ها با تحریک رگ‌زایی در فاز گرانوله در بافت
- دارای یک لایه شفاف غشایی نیمه تراوا روی سطح پانسمان است، که از طریق اسمز مواد مغذی را از لایه میانی پانسمان، به بستر زخم انتقال داده و ترشحات اضافی را از سطح زخم به روش اسمز معکوس به پانسمان ثانویه منتقل می‌نماید.
- در هنگام اشباع شدن انسجام و یکپارچگی خود را حفظ می‌نماید.
- پانسمان آلژی پد دارای یک لایه مقاوم و غیر چسبنده به سطح زخم است که در زمان تعویض، به بافت گرانوله، آسیب وارد نمی‌نماید.
- با ایجاد محیط مرطوب بهینه در بستر زخم، به افزایش سرعت ترمیم زخم کمک می‌نماید.
- در ابعاد ۵x۵، ۱۰x۱۰، ۱۰x۱۵ و ۱۵x۱۵ سانتی‌متری، در انواع سطحی و حفره ای جهت استفاده در زخم‌ها با اندازه‌های متفاوت، قابل ارائه می‌باشد.

موارد مصرف:

- زخم‌های مزمن و حاد دارای ترشحات کم، متوسط
- زخم‌های بستر (فشاری)
- زخم‌های پای دیابتی
- زخم‌های عروقی (وریدی-شریانی)
- زخم‌های جراحی
- سوختگی‌های درجه دو سطحی و عمقی
- زخم‌های عفونی و غیرعفونی
- زخم‌های محل دهنده و گیرنده پیوند پوست
- پانسمان آلژی پد قابل استفاده به عنوان پانسمان اولیه روی زخم‌ها می‌باشد و جهت تکمیل فرآیند درمان و مدیریت زخم، نیاز به پانسمان ثانویه مانند هیدروفیلیم، هیدروکلونید، فوم و رواهیل پد جاذب دارد.

روش مصرف:

- ابتدا زخم کاملاً تمیز شود و پانسمان آلژی پد روی زخم قرار گیرد.
- در زمان استفاده از پانسمان آلژی پد، سطح شفاف آن با فشار کم، روی زخم و سطح کدر، به سمت بیرون قرار داده شود.
- با توجه به نوع و میزان ترشحات زخم، می‌توانید از انواع پانسمان ثانویه مانند هیدروفیلیم، هیدروکلونید، فوم و رواهیل پد جاذب، استفاده نمایید.
- با توجه به میزان ترشحات زخم، فواصل تعویض پانسمان آلژی پد بین ۳ الی ۵ روز، توصیه می‌گردد. به عبارتی زمان تعویض پانسمان آلژی پد، وابسته به میزان اشباع آن می‌باشد.
- جهت افزایش اثربخشی در زخم‌های با ترشح کم، می‌توانید سطح پانسمان آلژی پد را با نرمال سالین، مرطوب نمایید.

هشدار:

- در صورت مخدوش بودن بسته بندی اولیه از استفاده پانسمان آلژی پد خودداری نمایید.
- در صورت بروز حساسیت به پانسمان‌ها یا مواد تشکیل دهنده آن، از استفاده پانسمان آلژی پد خودداری نمایید.
- پانسمان آلژی پد در سوختگی‌های درجه سه قابل استفاده نمی‌باشد.



AlgiPad® Dressing



شرکت رسا سلامت آروند
تلفن: +۹۸۲۱-۴۴۱۹۳۲۷۵

www.rasasalamatarvand.ir