

پانسمان رواهیل پد (Revaheal Pad/پانسمان جاذب)

پانسمان رواهیل پد، در حوزه مراقبت، مدیریت و درمان زخم بیمارانی که در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و منازل دارای ترشحات است، به عنوان جاذب ترشحات زخم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های پانسمان رواهیل پد:

- پانسمان رواهیل پد جهت کنترل و مدیریت ترشحات زخم در مراکز درمانی و منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- پانسمان رواهیل پد، از چند لایه، با ویژگی‌های خاص، تشکیل شده است:
- لایه اول سفید رنگ در تماس با زخم، ترشحات زخم را به هسته مرکزی پانسمان هدایت کرده و از خیس خوردگی اطراف زخم جلوگیری می‌کند.
- لایه دوم هسته مرکزی می‌باشد که وظیفه اصلی پانسمان رواهیل پد، برعهده این لایه است. هسته مرکزی ترشحات زخم را در خود محبوس نموده و از نشت ترشحات به سطح خارجی پانسمان، جلوگیری به عمل می‌آورد.
- لایه سوم پانسمان رواهیل پد، از نشت ترشحات جذب شده به خارج پانسمان جلوگیری می‌کند.
- پانسمانی با قدرت جذب بالای ترشحات
- کاهش ریسک خیس خوردگی در تعویض‌های طولانی مدت پانسمان
- سهولت استفاده از پانسمان رواهیل پد
- قابل انعطاف برای تطبیق به بستر زخم
- در ابعاد ۱۰×۱۰، ۱۵×۲۰، ۲۰×۲۰ و ۲۰×۴۰ سانتی‌متری جهت استفاده
- در زخم‌ها با اندازه‌های متفاوت، قابل ارائه می‌باشد.

موارد مصرف:

- زخم‌های مزمن و حاد دارای ترشحات کم، متوسط و زیاد
- زخم‌های بستر (فشاری)
- زخم‌های پای دیابتی
- زخم‌های عروقی (وریدی-شریانی)
- زخم‌های بعد از عمل‌های جراحی
- سوختگی‌ها
- زخم‌های عفونی و غیرعفونی
- زخم‌های محل دهنده و گیرنده پیوند پوست
- برداشتن فشار از روی زخم پای دیابتی و سایر زخم‌های دارای ترشحات
- پانسمان رواهیل پد قابلیت استفاده به عنوان پانسمان اولیه روی زخم‌ها و پانسمان ثانویه روی پانسمان آلژی پد، پانسمان آلژینات، پانسمان هیدروفایبر و پانسمان هیدروبالانس، را دارد.

روش مصرف:

- ابتدا زخم کاملاً تمیز شود و پانسمان رواهیل پد روی زخم قرار گیرد.
- در زمان استفاده از پانسمان رواهیل پد، سطح سفید رنگ روی زخم و سطح رنگی، به سمت بیرون قرار داده شود.
- پانسمان بدون چسب می‌باشد و باید با چسب حصیری یا باند، روی زخم ثابت شود.
- با توجه به میزان ترشحات زخم، فواصل تعویض پانسمان بین ۳ الی ۵ روز، توصیه می‌گردد.
- به هیچ عنوان پانسمان رواهیل پد، قابل برش نمی‌باشد.

هشدار:

- در صورت مخدوش بودن بسته بندی اولیه از استفاده پانسمان رواهیل پد خودداری نمایید.
- در صورت بروز حساسیت به پانسمان‌ها یا مواد تشکیل دهنده آن، از استفاده پانسمان رواهیل پد خودداری نمایید.



Revaheal Pad® Dressing



شرکت رسا سلامت آروند
تلفن: ۹۸۲۱-۴۴۱۹۳۲۷۵+

www.rasasalamatarvand.ir